

BTE 中文操作說明

首先感謝您使用科林耳掛型助聽器。

以下將為您說明科林耳掛型助聽器的使用方法。請仔細閱讀操作與保養指示，以避免故障和損壞的情況發生。

產品說明

依照您的聽力狀況，您收到的助聽器內容物包括：

- (1) 科林助聽器一台
- (2) 助聽器攜帶盒一個
- (3) 助聽器專用鋅空電池六顆
- (4) 中文操作說明一份
- (5) 全球保固卡一張



→ BTE 部件說明

使用耳塞形式



使用耳模形式




→ 助聽器的配戴

將耳塞或耳模正確的置入耳道內後，再將助聽器放於耳後，須注意不要將連接助聽器的音管或耳管扭轉到。




→ 啟動/關閉助聽器

【注意】為了延長電池使用壽命，在不使用助聽器時，請確認電池蓋是打開的狀態。開或關電池蓋時請不要太用力。

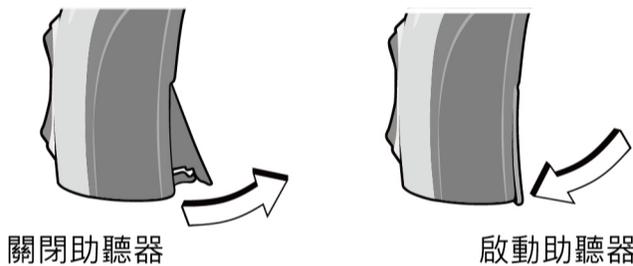


→ 置入耳塞

- ◎ 每次配戴都要有耐心、有毅力且不斷的練習。首先將耳塞或耳模正確的裝入，然後再將助聽器放置於耳後。
- ◎ 右邊的耳塞或耳模用右手裝入；反之，左邊則用左手裝入。
- ◎ 如下圖（不論左耳或右耳），用拇指及食指緊握住音管或耳管，將耳塞或耳模置於外耳道處，再慢慢推入耳道內，使整個耳塞塞緊耳道。
- ◎ 如果還是裝不上去，請尋求您的聽力師協助。
- ◎ 由於每個人耳朵大小不同，耳塞請選擇合適的大小。若您額外需要訂製耳模，請洽本公司全台科林門市。

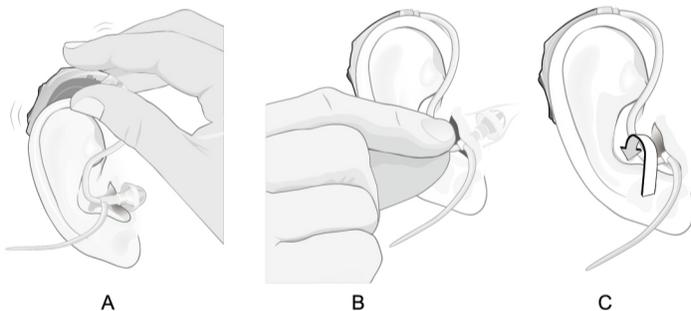

→ 更換電池


- ◎ 換電池時，應先將新電池放置在空氣中數分鐘，使電池與空氣進行氧化作用，如此有助於電池電量達到充足狀態。
- ◎ 使用您的手指甲將電池蓋輕輕打開，請不要太用力。
- ◎ 取出電池。（如果是新電池，請移除新電池上的貼紙）。
- ◎ 將電池平滑面(+符號)朝上放入。
- ◎ 將電池蓋推入，不可將邊緣露出。
- ◎ 關上電池蓋時，請不要太用力。
- ◎ 當您換新電池後，可能需要幾分鐘的時間，新的電池才會開始運作。
- ◎ 電池的使用壽命視使用情況而定，您可以向您的聽力師詢問更多訊息。

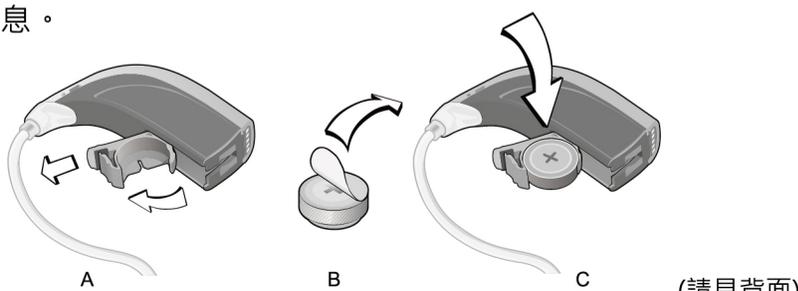

(請見背面)

→ 音量按鈕

- ◎ 您的助聽器有一組音量按鈕，可以自行調整音量的大小。
- ◎ 使用您的指尖去按壓按鈕，就可以調整音量。
【雙耳配戴】1.按右邊音量按鈕，則提高音量。
2.按左邊音量按鈕，則降低音量。
【單耳配戴】1.短按(少於一秒)則降低音量。
2.中按(約一秒)則提高音量。
- ◎ 如果您有選購無線藍牙串流器，您可以使用它來為您的助聽器音量進行微調。
- ◎ 若要回復到原始設定，只要將電池蓋打開再蓋上即可。
- ◎ 假設您不想使用音量按鈕的話，也可以請您的聽力師將音量按鈕鎖住。

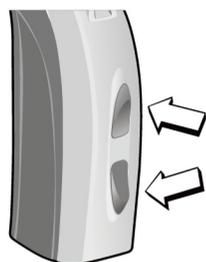

→ 電話線圈功能

電話線圈功能可以幫助您在使用某些電話或是身處在設有感應線圈系統的地方(例如：教堂、電影院、戲院...等等)，有較好的收音效果。

當電話線圈功能啟動時，您將可以透過感應線圈直接聽到語音或音樂。

當您看到右邊這個標誌或是相似的圖案，表示所處的地方設有感應線圈系統。



→ 低電池警示音

若是電池快沒電時，助聽器將每隔一段時間就會發出「嗶嗶」的警示音。這是在告訴您，請儘快更換新的電池。

→ 電池資訊

- ◎ 電池的壽命視使用情況而定，您可以向您的聽力師詢問更多訊息。
- ◎ 手邊隨時都要有多的備用電池。
- ◎ 如果長時間不使用助聽器，請將電池取出。
- ◎ 請使用高品質的助聽器專用電池，以免低劣品質的電池漏液損害助聽器。
- ◎ 睡覺或不戴助聽器時最好將電池蓋打開，以避免電池蓋中潮濕。
- ◎ 若發現電池潮濕，則建議此電池不要再使用。
- ◎ 使用過的電池最好送回您的聽力師或電池供應商處回收處理。
- ◎ 切勿將電池加熱，以免造成爆炸或受傷。
- ◎ 切勿將用完的電池和家用垃圾一同丟棄，以免造成環境污染。
注意：當使用除濕盒之類的儀器時，請將電池取出，以免造成電池壽命縮短。

→ 安全準則

如果助聽器和電池被吞入或是錯誤使用，都會造成危險，導致嚴重損傷甚至於可能致命。因此，在使用助聽器之前，需熟知以下注意事項並詳細研讀操作手冊。

- ◎ 初次配戴助聽器，建議可尋找受過訓練的聽力師進行指導與調整。
- ◎ 勿讓他人使用您的助聽器，因為它是依照您的聽力損失狀況去調整的，若是錯誤使用可能會導致他人永久性聽力損失。
- ◎ 配戴助聽器時，避免拍擊耳部及從事激烈的活動(像踢足球...等等)。
- ◎ 助聽器及其附件、電池等需遠離兒童及精神障礙者，以免他們誤吞而造成傷害。
- ◎ 小心處理廢棄電池，置放於嬰幼兒及精神障礙者拿不到的地方。
- ◎ 定期清潔助聽器及其附件，骯髒的助聽器或耳模可能會造成皮膚潰爛。
- ◎ 小心處理電池漏液，它是種很危險的物質。
- ◎ 勿試圖將非充電電池充電。
- ◎ 勿在嬰幼兒或是精神障礙者面前更換電池或進行助聽器調整。
- ◎ 任何情況下都不可將助聽器或電池含於口中，以免不小心吞入。
- ◎ 將電池與藥品分開放置，以免將電池當成藥丸吞下。
- ◎ 萬一誤吞助聽器或電池，請立即就醫。
- ◎ 助聽器有可能突然停止運作，像是電池沒電時。應注意這種可能性，特別是當您在乘車或需要注意警示聲音時。
- ◎ 不要將清潔工具塞入聲音輸出口或是麥克風收音口處，這樣會損害到助聽器。
- ◎ 助聽器不宜置於高溫的環境下或陽光直射地方。
- ◎ 助聽器受潮會損壞，淋浴時或洗頭前，先將助聽器取下。
- ◎ 切勿使助聽器與化學藥品如髮膠、香水、乳液、刮鬍液及殺蟲劑等接觸，使用前請先將助聽器取下。
- ◎ 保持助聽器的乾淨，可以用柔軟的乾布擦拭表面，勿用水或清潔劑處理。
- ◎ 在運動或流汗後，先將助聽器取下將汗水擦拭乾淨再配戴。
- ◎ 定期檢查及清潔助聽器、耳塞及耳管。
- ◎ 耳管如發現有水氣，必須用空氣球將溼氣去除。

→ 產品保固

科林耳掛型助聽器，自出貨日起，將由科林公司提供2年的產品保固。但電池、耳塞、耳管、音管等消耗性零件，化學損壞、磨損或機械損傷、使用不當、未經核准自行拆解或不當修理等，將不在保固範圍內。因此，請確實地遵守使用說明。

您專業聽力的好夥伴

免費諮詢專線 0800-551188